

# Uživatelská příručka

## **Elektrický vozík Kompakt**





Představujeme Vám moderní kompaktní seniorské vozítko, vybavené množstvím bezpečnostních prvků, mezi které patří mimo jiné nožní brzda. Spolu s nezávislou přední brzdou jsou tak brzděna všechna tři kola. Extrémně silná 25Ah lithiová baterie Vám umožní na jedno nabití ujet o 25% větší vzdálenost, než u běžně dodávaných 20Ah baterií. Maximální rychlost na nejvyšší stupeň je bezpečných 25 km/h. Výkon motoru je 1000W. Díky svým kompaktním rozměrům se vozík vejde do většiny výtahů, dobře se s ním manipuluje a lépe se přepravuje. Velký barevný displej zobrazuje rychlost, počet ujetých kilometrů, stav baterie, zapnutí světel a blinkrů a další informace. Dva košíky se budou hodit pro přepravu nákupu a nosnost 150 kg bude stačit většině řidičů.

## Detailní technická specifikace a funkce:

- Délka 140 cm
- Šířka 70 cm
- Výška včetně zrcátek 122 cm
- Výška řídítek 103 cm
- Výška sedačky od země 64 cm
- Rozměr sedačky 53x 25 cm
- Výška přídavné sedačky 44 cm
- Rozměr přídavné sedačky 13x16 cm
- Výška od země na nohy 24 cm
- Rozměr zadního košíku 28x12x20 cm (Š x HL x V)
- Rozměr předního košíku 27x24x15 cm (Š x HL x V)
- Nosnost 150 kg
- Bubnové brzdy - ruční + nožní
- Pneu 3.00-8
- Přední + zadní odpružení
- Přední a zadní směrovky
- Přední a koncová světla
- Zpátečka
- Klakson
- Alarm
- Výška přídavných řídítek 60 cm od země
- Dojezd na jedno nabití: až 65 km podle hmotnosti řidiče a profilu trati
- přepínání rychlostí - 16, 22, 25 km/h
- huštění pneumatik na tlak 2,5-2,8 baru podle váhy obsluhy

Součástí dodávky je nabíječka, zpětná zrcátka, DO k alarmu (2ks), klíček od zapalování (2ks) a klíček od schránky pod sedačkou (2ks).

## Nabíjení:

Nabíjení provádějte dodávanou nabíječkou při vypnutém vozíku. Nabíjecí konektor najdete nad podlahou pod přídatnou sedačkou (viz obrázek níže).

Nabíjení může trvat až 8 hodin, podle stavu vybití baterie. Při nabíjení baterie svítí kontrolka na nabíječce červeně a její větrák slyšitelně pracuje. Po nabití se kontrolka na nabíječce rozsvítí zeleně a její větrák se vypne. Baterii doporučujeme nabíjet průběžně a nečekat, až se vybije.

Parametry nabíječky: 71,4V, 3A

Parametry baterie: 60V, 25Ah, 1500Wh



## Ovládání:

Vozík zapnete vložením klíčku do zapalování a otočením vpravo. Tím je připraven k jízdě.



Otáčením pravé rukojeti přidáváte/ubíráte plyn,  
Přepínačem s písmeny F/R určujete směr jízdy (F – dopředu, R – dozadu)  
Přepínačem s písmeny I, II, III určujete maximálně dosažitelnou rychlost  
(I – 16 km/h, II – 22 km/h a III – 25 km/h)  
Stisknutím pravé brzdové páčky brzdíte přední kolo.



Na levé rukojeti je (odshora) přepínač světel, ovládání blinkrů a klakson. Levá brzdová páčka brzdí zadní kola a je vybavena aretací, čímž plní funkci ruční brzdy. Pro uvolnění aretace je nutné páčku znovu stisknout.



Nožní brzda je účinná na zadní kola a je umístěna na pravé straně u pravé nohy řidiče (viz obrázek).

## Jízdní pokyny

Dodržujte pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy a používejte ochranné pomůcky. Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a celkový technický stav vozíku. Nepřekračujte jeho maximální zatížení (150 kg). Vyvarujte se nadměrného zatěžování vozíku, vozík není určen pro skoky ani akrobatickou jízdu.

Je nebezpečné ovládat vozík pouze jednou rukou. Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě na mokrém, nebo zledovatělém povrchu. Myslete na to, že každý povrch, který není suchý, vyžaduje delší brzdovou dráhu a můžete tak předejít dopravní nehodě, nebo zranění. Při rozjezdu zrychlujte pomalu a plynule. Pro začátek trénujte jízdu na otevřeném prostranství mimo silniční provoz.

V případě, že budete potřebovat pomoci s ovládním vozíku nebo budete mít technický problém či dotaz, obraťte se na náš servis na tel. číslo 777 939 108 (po-pá 9.00 - 16.00) nebo na e-mailové adrese [servis@rcskladem.cz](mailto:servis@rcskladem.cz)